

STRZAŁKI TRENDU W DOSTĘPNYCH SYSTEMACH KONTROLI GLIKEMII

PARADIGM 722,754/VEO	640G	DEXCOM	FREESTYLE LIBRE	EFEKT KLINICZNY
Brak strzałek- glikemia wzrasta lub spada <1mg/dl na minutę	Brak strzałek- glikemia wzrasta lub spada <1mg/dl na minutę	→	→	Maksymalna zmiana glikemii o 20 mg/dl w ciągu 20 minut
↑lub↓	↑lub↓	↙ lub ↘	↙ lub ↘	Zmiana glikemii o 20-40 mg/dl w ciągu 20 minut
glikemia wzrasta lub spada o 1-2 mg/dl na minutę	glikemia wzrasta lub spada o 1-2 mg/dl na minutę	glikemia wzrasta lub spada o 1-2 mg/dl na minutę	glikemia wzrasta lub spada o 1-2 mg/dl na minutę	
↑↑lub↓↓	↑↑lub↓↓	↑lub↓	↑lub↓	Zmiana glikemii o 40-60 mg/dl w ciągu 20 minut
glikemia wzrasta lub spada o ≥2 mg/dl na minutę	glikemia wzrasta lub spada o 2 -3 mg/dl na minutę	glikemia wzrasta lub spada o 2 -3 mg/dl na minutę	Szybki wzrost/spadek stężenia glukozy powyżej 2 mg/dl na minutę	
UWAGA! TEN SAM SYMBOL W RÓŻNYCH URZĄDZENIACH OZNACZA INNY TREND!				